

Septalkan®

DETERGENTE DESINFECTANTE SIN ALCOHOL

Para la limpieza y desinfección mediante pulverización y secado húmedo

Use sobre las superficies (mesas, caretilas, muebles), los equipos (monitores) y los dispositivos médicos, invasivos y no invasivos, no sumergibles (ej: sondas endocavitarias, sondas de ecografía, endoscopios con cobertores, probadores de glucosa, generadores de hemodialisis).

Acción rápida: espectro de actividad en tan sólo 5 minutos.

Elimina 99,9999% de las bacterias.

Activo sobre las esporas de *Bacillus subtilis* y *Clostridium difficile*.**

Cuidado de los materiales: libre de alcohol, pH neutro.

Cuidado al usuario: sin perfume, sin sustancias alergénicas (sin EDTA y NTA)

Fórmula que puede estar en contacto con alimentos.

Protocolo de utilización

Frasco

1. Aplicar SEPTALKAN sobre una tela no tejida o directamente sobre la superficie 2. Limpiar minuciosamente la superficie a tratar. 3. Dejar actuar el producto 5 minutos. No enjuagar (excepto en el caso de superficies en contacto con alimentos). 4. Cambiar de tela no tejida para cada equipo.

Toallitas

1. Sacar una toallita de la bolsa. 2. Limpiar minuciosamente la superficie a tratar. 3. Dejar actuar el producto 5 minutos. No enjuagar (excepto en el caso de superficies en contacto con alimentos). 4. Cambiar de toallita para cada equipo. 5. Cerrar bien la bolsa después de usarla.



Presentaciones

Frasco pulverizador de 750ml
Paquete de 100 toallitas (180x200mm)
Bidon de 5lt



DISTRIBUIDORA



HECAR S.A. DE C.V.

MANUAL DE USO

Septalkan®

Botella de 750 mL



1. Asegúrese que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



2. Aplique **Septalkan Spray** directamente sobre toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



3. Distribuya uniformemente con una toalla o paño no tejido, respetando la técnica de limpieza y deje secar.



4. Deje actuar el producto sobre la zona donde fué aplicado durante 5 minutos.



5. No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).

CONSIDERACIONES DE USO

- No Requiere enjuague, optimizando el tiempo y el consumo de agua.

Toallitas



1. Asegúrese que la zona a limpiar y desinfectar se encuentre libre de sobreacumulación de polvo o materia orgánica.



2. Abra la tapa dispensadora del paquete de **Septalkan Toallitas** y tome una.



3. Limpie recorriendo unidireccional y uniformemente toda la zona que desea limpiar y desinfectar.



4. Deje actuar el producto sobre la zona donde fué aplicado durante 5 minutos.



5. No enjuague ni retire el producto. La zona estará libre de microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos y esporas).

CONSIDERACIONES DE USO

- Deseche la toallita usada y utilice una nueva para la limpieza y desinfección de cada dispositivo médico, equipo biomédico o zona a tratar.
- Mantener el empaque bien cerrado para conservar la humedad de las toallitas.



Descripción

Limpieza y desinfección por enjuague humedo de todas las superficies y los dispositivos medicos no sumergibles.

Actividad microbiologica

Bactericida ; Levuricida ; activo sobre *Aspergillus fumigatus* ; activo sobre Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, Hepatitis C, Hepatitis B, VIH.

Actividad especifica el pulverizador : activo sobre *Bacillus subtilis* y *Clostridium difficile*.

Precauciones de empleo

Utilizar los productos biocidas con precaución. Antes de utilizar el producto, leer la etiqueta y las informaciones a proposito del producto.

C E 0459
2013

USO PROFESIONAL

Septalkan®

DETERGENTE DESINFECTANTE SIN ALCOHOL

Para la limpieza y desinfección mediante pulverización y secado húmedo

Propiedades Microbianas

	ENSAYOS	MICRO-ORGANISMOS	TIEMPO DE CONTACTO
Bacterias	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
	EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
	EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	1 min
	NF T 72-281**	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	5 min
	EN 16615*	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
Fungicida	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 14562	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 13697	<i>Candida albicans</i>	5 min
	NF T 72-281**	<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> *	5 min
	EN 16615*	<i>Candida albicans</i>	5 min
Virus	EN 14476	Adenovirus, Norovirus	5 min
	EN 14476	Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Rotavirus	5 min
Esporas	NF T 72-281**	<i>Bacillus subtilis</i>	5 min
	NF T 72-281**	<i>Clostridium difficile</i>	5 min

*Estándares realizados en las toallitas. ** Estándares realizados con el pulverizador (seguidos o no por acción mecánica).

Composición

Preparación líquida y toallitas preimpregnadas, TP2/TP4, listo para uso. CLORURO DE DIDECL DIMETILAMMONIO n°CAS 7173-51-5 a 0.25g/kg. CLORURO DE ALQUIL (C12-16) BENCILDIMETILAMONIO n°CAS 68424-85-1 a 0.95g/kg.

Características

- Estado físico : líquido
- pH : 7,00 +/-0.25
- Perfume : no
- Color : incoloro

Precauciones

Utilizar los productos biocidas con precaución. Antes de usarlo, siempre leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto.

DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LA REPUBLICA MEXICANA DE LOS PRODUCTOS SODEL/ALKAPHARM FRANCIA.



CE 0459
2013
USO PROFESIONAL

Septalkan®

DISTRIBUIDORA



HECAR S.A. DE C.V.

MATRIZ
AGUASCALIENTES
Blvd Siglo XXI 1946
Colonia Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags. C.P. 20290

OFICINAS CDMX
Estenógrafos No. 16
Col. Sifón
Iztapalapa
C.P. 09400
Ciudad de México.

Tel: (449) 9711700 al 02
Tel. CDMX. (55) 56331933 con 6 líneas
hecarinfo@hecar.com.mx
www.hecar.com.mx